



Ankylos®

Acuris™ – конометрична концепція

Посібник і каталог продукції


Ankylos®

Імплантація з TissueCare

Справжня цінність імплантаційної системи стає очевидною лише з часом. Впродовж більш як 25 років імплантаційна система Ankylos є символом стабільної і довготривалої естетики. Результати численних публікацій і тривалий клінічний досвід свідчать про те, що Ankylos сприяє стабільності твердих та м'яких тканин, забезпечуючи природні та довготривалі естетичні результати.

Основою успіху є унікальна концепція Ankylos під назвою "TissueCare", що являє собою сукупність всіх ключових особливостей дизайну системи Ankylos.


SoftTissue Chamber™

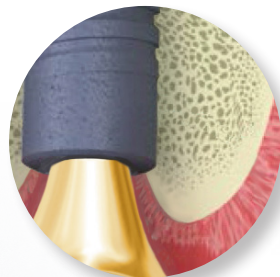


Універсальне з'єднання
TissueCare



Прогресивна різьба

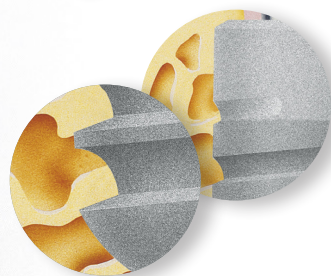

Поверхня
Friadent® plus

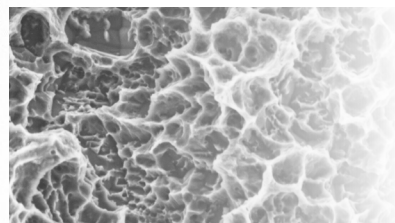

ЗМІСТ

Acuris™ – конометрична концепція	4
---	----------

Планування лікування

Попередні застереження	5
Імпланти для конометричної концепції	6
Абатменти для конометричної концепції	6

Покрокові процедури

КонOMETрична концепція крок за кроком	7
Покрокова процедура – Встановлення імплантату – Фіксація абатмента	8
Покрокова процедура – Негайне навантаження тимчасовою коронкою	9
Покрокова процедура – Ортопедичний і лабораторний протокол	10

Каталог продукції	14
--------------------------	-----------

Динамометричний ключ EV – застосування для прямих Ø 3.3 мм однокомпонентних абатментів	19
Рекомендований момент сили	20
Тлумачення символів на маркуванні та в інструкціях з використання	20
КонOMETричний інструмент для фіксації/ Динамометричний ключ EV – Інструкції з чищення та стерилізації	21
Показчик виробів	22


Цей посібник розроблено для лікарів, котрі пройшли відповідне навчання і практику з хірургічного і ортопедичного лікування на імплантатах. Залишатися на хвилі сучасних тенденцій і технік лікування в стоматологічній імплантації, постійно навчаючись, - обов'язок лікаря.

У посібнику подано лише додаткову інформацію, необхідну для роботи з конометричною концепцією. Всі інші вказівки та/або детальна інформація з встановлення імплантатів Ankylos і ортопедичного протоколу, а також необхідних інструментів та компонентів, представлена у відповідному посібнику і каталозі.

Вироби можуть бути представлені на вашому ринку не в повному обсязі. Будь ласка, зверніться до представника Dentsply Sirona у вашому регіоні, щоб отримати детальну інформацію щодо актуального асортименту і наявності.

З метою покращення читабельності, Dentsply Sirona не використовує знаки ® і ™ в основному тексті. Однак Dentsply Sirona не відмовляється від своїх прав на торгову марку, і жодна частина даного посібника не може трактуватися інакше.

Ілюстрації виробів представлено не в реальному масштабі.

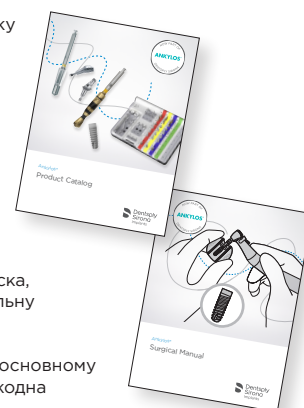

Acuris™ – конометрична концепція

Acuris – це зміна парадигм в ортопедичній фіксації незнімних коронок з можливістю зняття в кріслі лікаря. Фіксація за рахунок сили тертя дозволяє досягти естетики коронки з цементною фіксацією, однак без залишків цементу під слизовою і з можливістю зняття коронки.



Легкість застосування Acuris™

- Просте рішення для одиничних коронок, що заощаджує ваш час
- Незнімна фіксація з можливістю зняття в кріслі лікаря
- Безцементний спосіб фіксації
- Відсутність отворів для гвинтів
- Спрощена концепція реставрації, що зменшує час прийому



Попередні застереження

Acuris - це протокол протезування на імплантатах для безцементної реставрації на одиничних імплантатах.

- У випадку негайного навантаження, приймаючи рішення про те, коли саме навантажувати імплантат, лікар повинен ретельно перевірити та оцінити якість і об'єм кісткової тканини, первинну стабільність імплантата, дизайн реставрації та умови навантаження в кожному індивідуальному випадку.
- За можливості імплантати в дистальних ділянках необхідно встановлювати з максимальним діаметром і довжиною в межах наявної кісткової пропозиції.

- Однокомпонентні конометричні абатменти Ankylos необхідно затягувати з моментом сили 25 Нсм, щоб забезпечити стабільне гвинтове з'єднання і попереднє навантаження. Для конометричних абатментів Ankylos з центральним стяжним гвинтом застосовують момент сили 15 Нсм. Таким чином, якщо розглядається варіант негайного навантаження тимчасовою конструкцією, імплантати повинні мати достатню стабільність, щоб витримати момент сили під час закручування. За наявності сумнівів альтернативою може бути формування ясен або навіть застосування двохетапного хірургічного протоколу.
- Щоб полегшити висадку постійної коронки, важливо уникати взаємодії зі слизовою навколо абатмента. Забезпечте достатньо простору для постійної реставрації за рахунок дизайну тимчасової коронки, що дозволить загоєння слизової у потрібній формі.

Відсутність гвинтових отворів

- Полегшена експлуатація
- Покращена естетика
- Нахил імплантату менш критичний, що дозволяє більш ефективно використати наявну кісткову тканину.



Відсутність цементу

- Полегшена експлуатація
- Більш швидкий процес висадки коронки – жодних залишків цементу
- Захист імплантату -опорних тканин

Більш проста та швидка експлуатація

- Знімна коронка для проведення корекцій/ремонт/лікування періімплантиту
- Всі корекції/ремонт зручно виконуються поза ротовою порожниною
- Відсутність потреби замінювати матеріал для закриття гвинтового отвору



Абатменти двох діаметрів, з різною висотою ясен, прямі та з кутом 15°.

Імпланти для конометричної концепції

Діаметри і довжини імплантату Ankylos C/X

Імпланти Ankylos C/X доступні в чотирьох діаметрах і різноманітних довжинах. Зручна класифікація розмірів забезпечує їх застосовність для всіх показань в дентальній імплантології і контрольовану кількість необхідних імплантатів.

Діаметри	3.5 мм (A)	4.5 мм (B)	5.5 мм (C)	7.0 мм (D)
Довжини	6.6 мм	6.6 мм	6.6 мм	-
	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм
	9.5 мм	9.5 мм	9.5 мм	9.5 мм
	11 мм	11 мм	11 мм	11 мм
	14 мм	14 мм	14 мм	14 мм
	17 мм	17 мм	17 мм	-

Імпланти ідентифікують за великою літерою, що вказує на діаметр, і номером. Номер вказує на довжину імплантату в міліметрах.

Кольорове кодування на упаковці імплантату відповідає різним діаметрам імплантатів. Інструменти, що застосовуються для препарування ложа імплантату, також мають кольорове кодування.



Доступні розміри конометричних абатментів для імплантатів Ankylos

КонOMETричний абатмент

Вісь: прямий або з кутом 15°

Діаметр на екваторі абатмента: 3.3 мм або 4.5 мм

Висота ясен: 1.5 мм, 3.0 мм або 4.5 мм

Для оптимального позиціонування всі конометричні абатменти Ankylos доступні виключно з консуним з'єднанням (C/).

Термін "індекс" використовується на позначення трикутного замка між абатментом і постійним конометричним ковпачком.


Примітка: КонOMETричний абатмент Ankylos з діаметром 3.3 у прямій версії - це однокомпонентний абатмент зі спеціальною вікрутою для абатмента, момент сили закручування 25 Нсм. Всі інші конометричні абатменти Ankylos мають інтегрований гвинт, зафіксований методом лазерного зварювання, котрий вкручують за допомогою шестигранної викрутки 1.0 мм і моментом сили 15 Нсм.



Конометрична концепція крок за кроком

Нижче показано техніку застосування тимчасового конометричного ковпачка в якості основи для тимчасової реставрації в кабінеті лікаря.


Коли тимчасова коронка не потрібна, в якості альтернативи можна використовувати конометричний ковпачок для загоєння, що защіпається на абатменті.

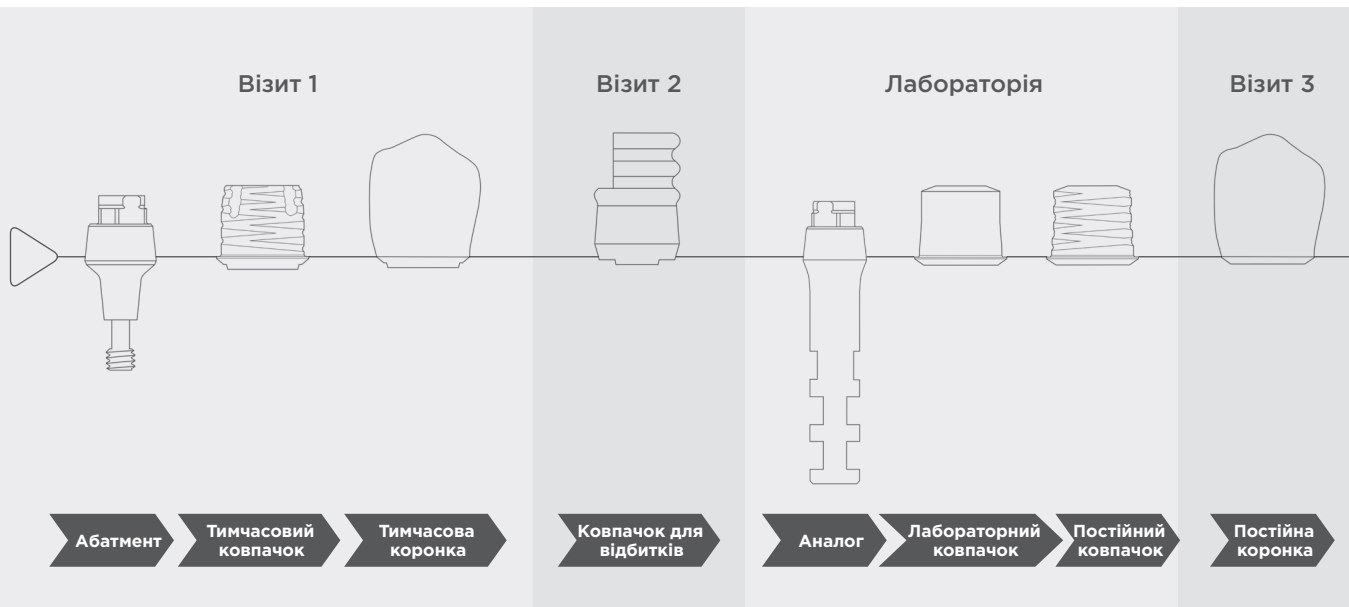

Покрокова процедура - Встановлення імплантату і фіксація абатмента

Нижче проілюстровано процедуру встановлення імплантату і фіксації абатмента на нижній щелепі з використанням імплантату Ankylos C/X і з'єднання конометричного абатмента C/.

Клінічний протокол – встановлення імплантату і фіксація абатмента

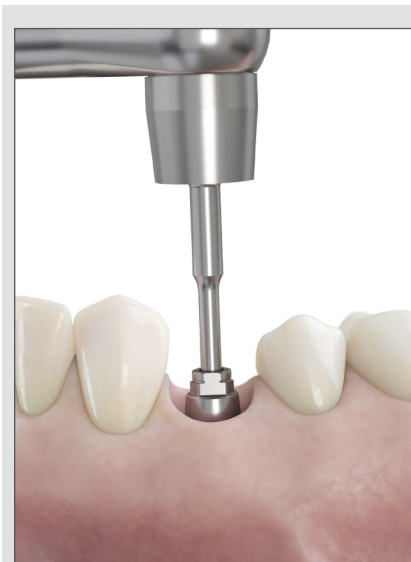

Встановлення імплантату Підбір абатмента

- Відпрепаруйте ложе імплантату і встановіть імплантат.
- Виміряйте висоту м'яких тканин.
- Краще встановлювати край абатмента на 1 мм нижче рівня м'яких тканин.
- Підберіть потрібний абатмент, обравши відповідну висоту і кут нахилу.

Примітка: З повним хірургічним протоколом з доступними варіантами можна ознайомитися в Хірургічному посібнику Ankylos.

Встановлення абатмента – Двокомпонентний прямий абатмент 4.5

- Під'єднайте конометричний абатмент C/ і виконайте первинне затягування вручну, за допомогою шестигранної насадки для ортопедичної тріскачки 1.0 мм.

Фіксація абатмента

- Щоб затягнути абатмент з рекомендованим моментом сили (15 Нсм), використовуйте ортопедичну тріскачку і шестигранну насадку для ортопедичної тріскачки 1.0 мм. Це стосується всіх абатментів з інтегрованим стяжним гвинтом.

Покрокова процедура – негайне навантаження тимчасовою короною

Наступна процедура – це техніка застосування тимчасового ковпачка в якості основи для тимчасової реставрації в кабінеті лікаря. Коли тимчасова корона не потрібна, в якості альтернативи можна використовувати ковпачок для загоєння, що захищається на абатменті.

Примітка: Також можливе застосування лабораторної техніки.



Тимчасовий конометричний ковпачок

Ковпачок використовують для виготовлення тимчасової корони. Може використовуватися до шести місяців.



КонOMETричний ковпачок для загоєння

Ковпачок захищає абатмент, коли не застосовується тимчасова корона. Може використовуватися до шести місяців.

Клінічний протокол – негайне навантаження тимчасовою короною



Тимчасовий конометричний ковпачок

- За допомогою інструменту для встановлення тимчасового ковпачка візьміть потрібний тимчасовий ковпачок (1a).
- Випірвняйте тимчасовий ковпачок з індексом абатмента, заціпніть (1b).



Інструмент для встановлення тимчасового конометричного ковпачка

Застосовується для перенесення ковпачка на абатмент і його заціпання.

Тимчасова корона

- Сформуйте корону на тимчасовому ковпачку зручним для вас способом (2a).
- Зніміть тимчасову корону (2b).
- Підшлифуйте і відполіруйте екстраорально (2c).

Примітка: Для полегшення висаджування постійної корони важливо уникати взаємодії зі слизовою навколо абатмента. Забезпечте достатньо простору для постійної реставрації за рахунок виготовлення тимчасової корони, дизайн котрої дозволить загоєння слизової у потрібній формі.

Висаджування тимчасової корони

- Посадіть корону і заціпніть (3a).
- Перевірте контакт з прилеглими зубами і за потреби пришлифуйте корону до встановлення коректного оклюзійного співвідношення (3b).

Покрокова процедура – Ортопедичний і лабораторний протокол



**Конометричний
ковпачок для
відбитків**

Застосовується для
перенесення положення
абатмента.

Протокол клінічного застосування – техніка закритої ложки з рівня абатмента



Ковпачок для відбитків

- Зніміть тимчасову коронку (1a).
- Вирівняйте потрібний ковпачок для відбитків відносно індекса абатмента і щільно висадіть, защіпнувши (1b).

Відбиток

- Для зняття відбитка використовуйте техніку закритої ложки.
- Навколо ковпачка окремо використовуйте еластомерний матеріал для відбитків (2a).
- Помістіть ложку з відбитковим матеріалом і зніміть відбиток (2b).
- Щойно відбитковий матеріал застигне, дістаньте відбиток з ротової порожнини.

Відбиток

- Перевірте відбиток на правильність і стабільність фіксації ковпачка (3a).
- Повторно встановіть тимчасову коронку (3b).
- Відправте відбиток в лабораторію.



Конометричний аналог




Відповідає абатменту і використовується в гіпсовій моделі.



Конометричний лабораторний ковпачок

Використовується зубним техніком під час виготовлення коронки.

Лабораторний протокол – техніка закритої ложки з рівня абатмента

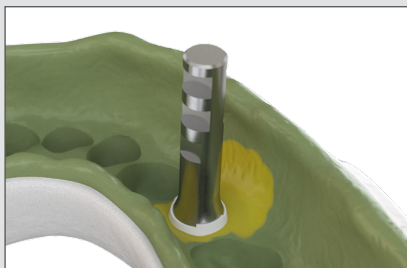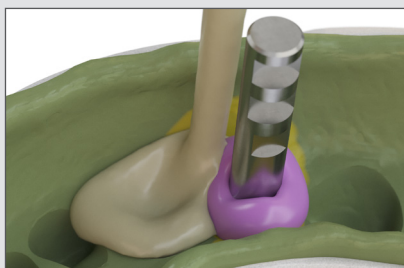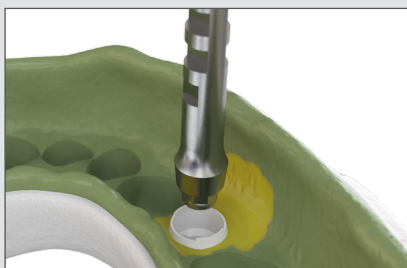

Конометричний ковпачок для відбитків/Конометричний аналог

- Встановіть потрібний конометричний аналог у правильне положення в ковпачок для відбитків до заціпання.

Примітка: Конометричний аналог призначений для одноразового використання.

Гіпсова модель

- Залейте в відбиток високоякісний гіпс і виготовте гіпсову модель зі знімною ясенною маскою.

Конометричний лабораторний ковпачок

- Посадіть лабораторний ковпачок на аналог абатмента.



**Постійний
конометричний
ковпачок**

Коронку цементують на
ковпачок.

Лабораторний протокол



Виготовлення коронки

- Виготовте керамічну коронку звичним для вас способом.

Підготовка до цементування

- Очистіть ковпачок і підготуйте коронку відповідно до інструкцій виробника цементу.

Завершення роботи над реставрацією


- Встановіть постійний ковпачок на аналог абатмента, вирівнявши його за індексом аналога (1a).
- Задійте фіксацію легким постукуванням.
- Прицементуйте коронку на постійний ковпачок.
- Вибір цементу залежить від матеріалу в реставрації у поєднанні з постійним ковпачком з титану з нітрид-титановою поверхнею.
- Видаліть надлишок цементу і відполіруйте.
- Коронку можна відправляти у клініку (1b).



Вигнута насадка для конометричного інструменту для фіксації

Одноразова РЕЕК-насадка вдягається на кінчик конометричного інструменту для фіксації. Т Доступна також в увігнутій та U-подібній формі.

Протокол клінічного застосування

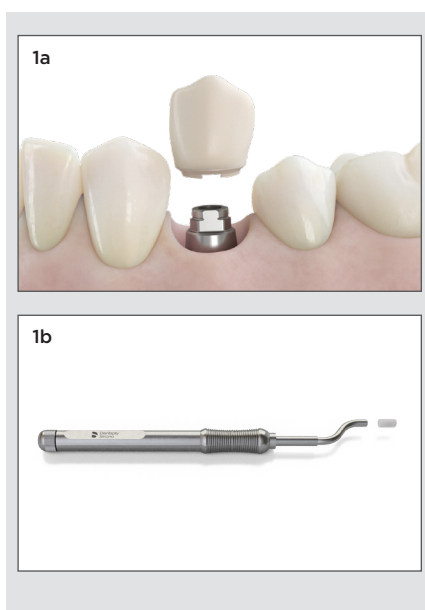

Зняття тимчасової коронки

- Зніміть тимчасову коронку (1a).
- Залежно від форми коронки, оберіть одноразову насадку відповідної форми і прикріпіть до конометричного інструменту для фіксації (1b).

Висадка постійної коронки

- Встановіть постійну коронку, вирівнявши її за індексом абатмента (2a).
- Помістіть інструмент для фіксації на коронку і вирівняйте його за траєкторією встановлення (2b).
- Натисніть на інструмент для фіксації у напрямку коронки до моменту клацання пружини, що активує фіксацію.

Перевірка постійної коронки

- Перевірте контакт з прилеглими зубами і за потреби пришліфуйте коронку до встановлення коректного оклюзійного співвідношення.
- Перевірте колір і характеристики.
- За необхідності зніміть коронку для дошліфовування і полірування і повторно встановіть за допомогою інструмента для фіксації.



КонOMETричний інструмент для фіксації

Активує фіксацію за рахунок сили тертя між постійним ковпачком/постійною коронкою і абатментом за допомогою поєднання тиску та імпульсу.

Каталог продукції Acuris™ – конометрична концепція

В даному посібнику і каталозі представлено компоненти, розроблені спеціально для застосування конометричної концепції на імплантатах Ankylos. Фрези та інші інструменти можна знайти в каталозі продукції Ankylos.

Більше інформації за посиланням www.dentsplyimplants.com.



Конометричні абатменти

Конометричний абатмент C/0° Ø3.3



Ø мм	3.3	3.3	3.3
A – висота мм	1.5	3	4.5
Номер артикулу	3102 3410	3102 3420	3102 3430

Конометричний абатмент C/, прямий і кутовий

Сплав титану-ELI, нестерильно

- Для одиничних зубів, виключно незнімні реставрації
- Два діаметри, однаковий ортопедичний інтерфейс та компоненти для всіх абатментів однакового діаметру
- Прямі абатменти Ø 3.3 мм є однокомпонентними

Конометричний абатмент C/15° Ø3.3



Ø мм	3.3	3.3	3.3
A – висота мм	1.5	3	4.5
B – висота мм	2.3	3.8	5.3
Номер артикулу	3102 3412	3102 3422	3102 3432

Конометричний абатмент C/0° Ø4.5





Ø мм	4.5	4.5	4.5
A – висота мм	1.5	3	4.5
Номер артикулу	3102 3450	3102 3460	3102 3470

Конометричний абатмент C/15° Ø4.5



Ø мм	4.5	4.5	4.5
A – висота мм	1.5	3	4.5
B – висота мм	2.6	4.1	5.6
Номер артикулу	3102 3452	3102 3462	3102 3472

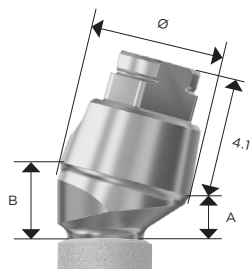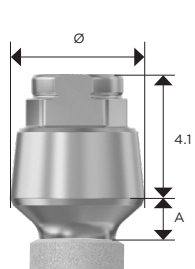

Інструменти та компоненти для реставрації

Викрутка для конометричних абатментів

Нержавіюча сталь, нестерильно

- Для однокомпонентних абатментів

Конометрична викрутка для абатментів



Ø мм	3.3	3.3
Висота мм	25	20
Номер артикулу	3107 2909	3107 2910

Динамометричний ключ EV

Нержавіюча сталь, нестерильно

- Використовуйте разом з ручкою для викрутки і конометричною викруткою для затягування однокомпонентних абатментів.

Динамометричний ключ EV



Номер артикулу	25774
----------------	-------

Ручки для викрутки до динамометричного ключа EV

Нержавіюча сталь, нестерильно

Ручка для викрутки до динамометричного ключа EV

Низька



Номер артикулу	25776	25777
----------------	-------	-------

Інструмент для встановлення тимчасового конометричного ковпачка

Нержавіюча сталь, нестерильно

- Використовується для перенесення ковпачка на абатмент і його фіксації шляхом заціпання.

Інструмент для встановлення тимчасового конометричного ковпачка



Ø мм	3.3	4.5
Висота мм	24.5	24.5
Номер артикулу	3103 3636	3103 3637

Конометричний інструмент для фіксації

Нержавіюча сталь, нестерильно

- Активує фіксацію за рахунок сили тертя між постійним ковпачком/постійною коронкою і абатментом за допомогою поєднання тиску та імпульсу.

Конометричний інструмент для фіксації



Номер артикулу	3107 2911
----------------	-----------

Інструменти та компоненти для реставрації

Насадки для конометричного інструмента для фіксації

			
	Насадка вигнута (5 шт.)	Насадка U-подібна (5 шт.)	Насадка увігнута (5 шт.)
Висота мм	11	9.5	10.5
Номер артикулу	3107 2906	3107 2907	3107 2908

Насадка для конометричного інструмента для фіксації

PEEK-пластик, нестерильно
Для одноразового використання

- Одягається на конометричний інструмент для фіксації.

Конометричний ковпачок для загоєння

			
Конометричний абатмент Ø мм	3.3	3.3	4.5
Ø мм	4.8	6.0	6.0
Висота мм	5.3	5.3	5.3
Номер артикулу	3107 2101	3107 2102	3107 2103

Конометричний ковпачок для загоєння

PEEK-пластик, нестерильно
Суцільний, для одноразового використання

- Ковпачок захищає абатмент у випадках, коли тимчасова коронка не використовується.
- Може використовуватися до шести місяців.




Конометричний ковпачок для відбитків

		
Конометричний абатмент Ø мм	3.3	4.5
Ø мм	5.4	5.4
Висота мм	8.3	8.3
Номер артикулу	3107 2001	3107 2002

Конометричний ковпачок для відбитків

PEEK-пластик, нестерильно
Для одноразового використання

- Ковпачок застосовується для перенесення положення абатмента.

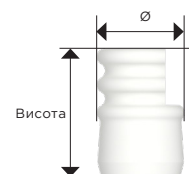

Тимчасовий конометричний ковпачок

		
Конометричний абатмент Ø мм	3.3	4.5
Ø мм	4.6	5.8
Висота мм	5	5.3
Номер артикулу	3107 2112	3107 2114

Тимчасовий конометричний ковпачок

Ковпачок Ø 3.3/4.6:
Титановий сплав-ELI/PEEK-пластик, нестерильно
Для одноразового використання

Ковпачок Ø 4.5/5.8:
PEEK-пластик, нестерильно
Призначений для одноразового використання

- Ковпачок застосовується для виготовлення тимчасової коронки.
- Може використовуватися до шести місяців.



Лабораторні компоненти

Конометричний аналог

Нержавіюча сталь, нестерильно
Для одноразового використання

- Відповідає абатменту і використовується на гіпсовій моделі.

Конометричний аналог



Конометричний абатмент Ø мм	3.3	4.5
Висота мм	20	20
Номер артикулу	3104 7210	3107 2020

Конометричний лабораторний ковпачок

Титановий сплав ELI, нестерильно
Для одноразового використання

- Лабораторний ковпачок застосовується зубним техніком під час виготовлення коронки.

Конометричний лабораторний ковпачок



Конометричний абатмент Ø мм	3.3	4.5
Ø мм	4.6	5.8
Висота мм	5	5
Номер артикулу	3107 2121	3107 2123

Постійний конометричний ковпачок

Титан класу 4, нітрид-титанове покриття, нестерильно
Для одноразового використання

- На ковпачок цементують коронку.

Постійний конометричний ковпачок



Конометричний абатмент Ø мм	3.3	4.5
Ø мм	4.6	5.8
Висота мм	5	5
Номер артикулу	3107 2301	3107 2303

Динамометричний ключ EV – застосування для прямих Ø 3.3 мм однокомпонентних абатментів

Для затягування прямих Ø 3.3 мм однокомпонентних абатментів використовуйте ручку для викрутки EV і динамометричний ключ EV разом з конометричною викруткою для абатментів.



Монтаж ключа

- Зберіть інструмент, одягнувши голівку на корпус ключа і прокрутивши до виразного клацання.

Фіксація викрутки

- Зафіксуйте конометричну викрутку для абатментів у ручку для викрутки і потім у динамометричний ключ до виразного клацання.

Застосування

- Притримуйте пальцем ручку для викрутки, щоб зафіксувати її в одному положенні. Потім м'яко потягніть за важіль динамометричного ключа у напрямку стрілки до моменту досягнення потрібного моменту сили.

Примітка: Важіль динамометричного ключа не повиненходити за межі шкали, оскільки це може призвести до неточності показників моменту сили.

Стрілка на голівці ключа вказує напрямком, в якому працює ключ.



Момент сили для встановлення конометричних абатментів


Для конометричних абатментів застосовується два різних принципи побудови:

Прямі абатменти Ø 3.3 мм є однокомпонентними. Їх встановлюють за допомогою спеціальних інструментів, що кріпляться до голівки абатмента. Для досягнення рекомендованого моменту сили (25 Нсм) під час затягування прямих однокомпонентних абатментів Ø 3.3 мм використовуйте ручку для викрутки EV разом з конометричною викруткою для абатментів і динамометричним ключем EV.



Прямі абатменти Ø 4.5 мм та кутові абатменти є двокомпонентними і постачаються з інтегрованим гвинтом абатмента.

Гвинт абатмента рухомий, але незнімний. Для досягнення рекомендованого моменту сили (15 Нсм) під час затягування абатментів з інтегрованим гвинтом використовуйте ортопедичну тріскачку і 1.0 мм шестигранну насадку для ортопедичної тріскачки.

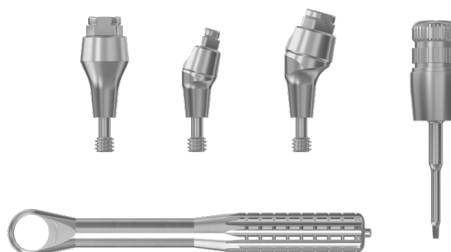

Тлумачення символів, що використовуються на маркуванні та в інструкціях з використання


	Дата виготовлення.		Повторно не використовувати.		Користуйтеся інструкцією щодо використання.*
	Виробник.		Повторно не стерилізувати.		Код партії.
	Термін використання.		ГОСТ є діючою системою сертифікації якості в Російській Федерації.		Каталожний номер.
	Стерилізовано опроміненням.		Вироби, що мають CE маркування, задовольняють вимоги Директиви щодо медичних виробів.		Містить каталожний номер (GTIN-номер), код партії і кількість.
	Увага: Федеральний закон (США) обмежує продаж даного виробу лікарем-стоматологом або за його розпорядженням.		Ідентифікатор Уповноваженого органу.		
	Не стерильно.		Не використовувати в разі пошкодження пакування.		

* Для перегляду PDF-файлів вам знадобиться Adobe Reader. Завантажуйте безкоштовно тут: get.adobe.com/reader.

Конометричний інструмент для фіксації

Конометричний інструмент для фіксації необхідно розбирати для проведення чищення і можна знову зібрати для стерилізації виключно сухим жаром.

Важливо: Запчастини необхідно зібрати відповідно до зображення нижче. Менша пружина навмисне вигнута.

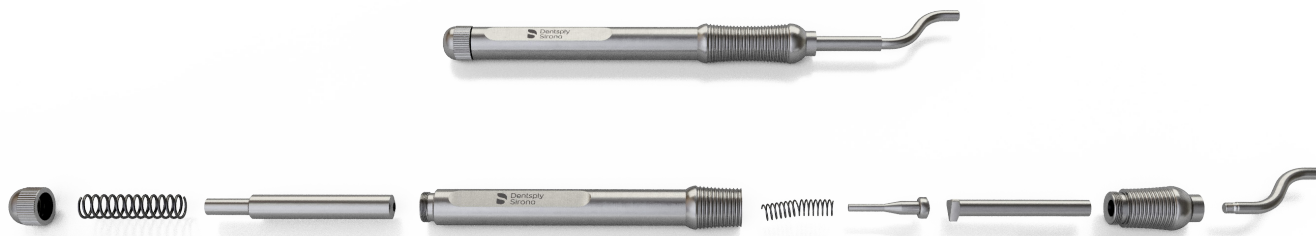

Динамометричний ключ EV



Демонтаж

- Дістаньте з ключа ручку для викрутки.
- Зніміть голівку: натисніть пальцем на заглиблення (1) і обережно стягніть голівку (2).

Чищення і просушка

- Тепер три відокремлені запчастини готові до чищення водою і щіткою. Після чищення залиште запчастини просохнути.

Стерилізація

- Дотримуйтеся інструкцій з використання виробника.

Показчик виробів

За каталожним номером

Артикул	сторінка
25774	Динамометричний ключ EV.....17
25776	Ручка для викрутки до динамометричного ключа EV.....17
25777	Ручка для викрутки до динамометричного ключа EV, низька.....17
3102 3410	Конометричний абатмент C/ 1.5/0°/Ø3.3.....15
3102 3412	Конометричний абатмент C/ 1.5/15°/Ø3.3.....15
3102 3420	Конометричний абатмент C/ 3.0/0°/Ø3.3.....15
3102 3422	Конометричний абатмент C/ 3.0/15°/Ø3.3.....15
3102 3430	Конометричний абатмент C/ 4.5/0°/Ø3.3.....15
3102 3432	Конометричний абатмент C/ 4.5/15°/Ø3.3.....15
3102 3450	Конометричний абатмент C/ 1.5/0°/Ø4.5.....15
3102 3452	Конометричний абатмент C/ 1.5/15°/Ø4.5.....15
3102 3460	Конометричний абатмент C/ 3.0/0°/Ø4.5.....15
3102 3462	Конометричний абатмент C/ 3.0/15°/Ø4.5.....15
3102 3470	Конометричний абатмент C/ 4.5/0°/Ø4.5.....15
3102 3472	Конометричний абатмент C/ 4.5/15°/Ø4.5.....15
3103 3636	Ін-мент для встановлення тимчасового кон-го ковпачка, Ø3.3..16
3103 3637	Ін-мент для встановлення тимчасового кон-го ковпачка, Ø4.5..16
3104 7210	Конометричний аналог, Ø 3.3/0°.....18
3107 2001	Ко-ний ковпачок для відбитків, Ø 3.3/5.4, для од.зубів.....17
3107 2002	Ко-ний ковпачок для відбитків, Ø 4.5/5.4, для од.зубів.....17
3107 2020	Конометричний аналог, Ø 4.5/0°.....18
3107 2101	Конометричний ковпачок для загоєння, Ø 3.3/4.8.....17
3107 2102	Конометричний ковпачок для загоєння, Ø 3.3/6.0.....17
3107 2103	Конометричний ковпачок для загоєння, Ø 4.5/6.0.....17
3107 2112	Ко-ний тимчасовий ковпачок, Ø 3.3/4.6, для од.зубів.....17
3107 2114	Ко-ний тимчасовий ковпачок, Ø 4.5/5.8, для од.зубів.....17
3107 2121	Ко-ний лабораторний ковпачок, Ø 3.3, для од.зубів (з інд.).....18
3107 2123	Ко-ний лабораторний ковпачок, Ø 4.5, для од.зубів (з інд.).....18
3107 2301	Конометричний постійний ковпачок, TiN, Ø 3.3, для од.зубів.....18
3107 2303	Конометричний постійний ковпачок, TiN, Ø 4.5, для од.зубів.....18
3107 2906	Насадка для кон-го інструмента для фіксації, вигнута (5 шт.).....17
3107 2907	Насадка для кон-го інструмента для фіксації, U-подібна (5 шт.).....17
3107 2908	Насадка для кон-го інструмента для фіксації, увігнута (5 шт.).....17
3107 2909	Конометрична викрутка для абатментів Ø 3.3, 25мм.....16
3107 2910	Конометрична викрутка для абатментів Ø 3.3, 20мм.....16
3107 2911	Конометричний інструмент для фіксації.....16

В алфавітному порядку

Артикул	сторінка
25774	Динамометричний ключ EV.....17
3103 3636	Ін-мент для встановлення тимчасового кон-го ковпачка, Ø3.3..16
3103 3637	Ін-мент для встановлення тимчасового кон-го ковпачка, Ø4.5..16
3107 2909	Конометрична викрутка для абатментів Ø 3.3, 25мм.....16
3107 2910	Конометрична викрутка для абатментів Ø 3.3, 20мм.....16
3102 3410	Конометричний абатмент C/ 1.5/0°/Ø3.3.....15
3102 3412	Конометричний абатмент C/ 1.5/15°/Ø3.3.....15
3102 3420	Конометричний абатмент C/ 3.0/0°/Ø3.3.....15
3102 3422	Конометричний абатмент C/ 3.0/15°/Ø3.3.....15
3102 3430	Конометричний абатмент C/ 4.5/0°/Ø3.3.....15
3102 3432	Конометричний абатмент C/ 4.5/15°/Ø3.3.....15
3102 3450	Конометричний абатмент C/ 1.5/0°/Ø4.5.....15
3102 3452	Конометричний абатмент C/ 1.5/15°/Ø4.5.....15
3102 3460	Конометричний абатмент C/ 3.0/0°/Ø4.5.....15
3102 3462	Конометричний абатмент C/ 3.0/15°/Ø4.5.....15
3102 3470	Конометричний абатмент C/ 4.5/0°/Ø4.5.....15
3102 3472	Конометричний абатмент C/ 4.5/15°/Ø4.5.....15
3104 7210	Конометричний аналог, Ø 3.3/0°.....18
3107 2020	Конометричний аналог, Ø 4.5/0°.....18
3107 2911	Конометричний інструмент для фіксації.....16
3107 2101	Конометричний ковпачок для загоєння, Ø 3.3/4.8.....17
3107 2102	Конометричний ковпачок для загоєння, Ø 3.3/6.0.....17
3107 2103	Конометричний ковпачок для загоєння, Ø 4.5/6.0.....17
3107 2001	Ко-ний ковпачок для відбитків, Ø 3.3/5.4, для од.зубів.....17
3107 2002	Ко-ний ковпачок для відбитків, Ø 4.5/5.4, для од.зубів.....17
3107 2121	Ко-ний лабораторний ковпачок, Ø 3.3, для од.зубів (з інд.).....18
3107 2123	Ко-ний лабораторний ковпачок, Ø 4.5, для од.зубів (з інд.).....18
3107 2301	Конометричний постійний ковпачок, TiN, Ø 3.3, для од.зубів.....18
3107 2303	Конометричний постійний ковпачок, TiN, Ø 4.5, для од.зубів.....18
3107 2112	Конометричний тимчасовий ковпачок, Ø 3.3/4.6, для од.зубів.....17
3107 2114	Конометричний тимчасовий ковпачок, Ø 4.5/5.8, для од.зубів.....17
3107 2906	Насадка для кон-го інструмента для фіксації, вигнута (5 шт.).....17
3107 2907	Насадка для кон-го інструмента для фіксації, U-подібна (5 шт.).....17
3107 2908	Насадка для кон-го інструмента для фіксації, увігнута (5 шт.).....17
25776	Ручка для викрутки до динамометричного ключа EV.....17
25777	Ручка для викрутки до динамометричного ключа EV, низька.....17

СТОМУС

Ексклюзивний дистриб'ютор ANKYLOS® в Україні

ТОВ "СТОМУС"

м. Київ - 02660, вул. Попудренка, 52, оф. 413а,

Тел. +38 (044) 586-59-60

E-mail: info@stomus.com.ua

www.stomus.com.ua

Про Dentsply Sirona Implants

Dentsply Sirona Implants пропонує всеосяжні рішення для всіх етапів імплантаційного лікування, в тому числі імплантаційні лінійки Ankylos®, Astra Tech Implant System® і Xive®; цифрові технології, такі як високоіндивідуалізовані CAD/CAM компоненти Atlantis®, та рішення для направленого хірургічного лікування Simplant®; рішення для регенерації тканин Symbios® та програми професійного і бізнес-розвитку, такі як STEPPS™. Dentsply Sirona Implants - надійний партнер професіоналів в сфері стоматології, що забезпечує можливість досягати прогнозованих та довготривалих результатів імплантологічного лікування і покращувати якість життя пацієнтів.

Про Dentsply Sirona

Dentsply Sirona є найбільшим в світі виробником продуктів та технологій для професійного стоматологічного застосування зі 130-річною історією інновацій та обслуговування стоматологів і пацієнтів в усьому світі. Dentsply Sirona займається розробкою, виробництвом та продажем повної лінійки рішень, включно зі стоматологічною продукцією та продукцією для гігієни ротової порожнини, а також іншими витратними медичними виробами з обширного асортименту брендів світового класу.

Продукція Dentsply Sirona під маркою THE DENTAL SOLUTIONS COMPANY™ це високоякісні, інноваційні та ефективні рішення для більш якісного, швидкого та безпечного стоматологічного лікування. Головний офіс компанії Dentsply Sirona знаходиться в місті Йорк (Пенсильванія, США), міжнародний офіс - у місті Зальцбург, Австрія. Акції компанії представлені на американській фондовій біржі NASDAQ під кодом XRAY.

Більше інформації про компанію Dentsply Sirona та її продукцію на сайті www.dentsplysirona.com.

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona